

## Emser® Nasendusche – Anwendungsempfehlung:



Emser Salz®  
2,95 g



Emser®  
Nasenspülsalz 2,5 g

Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten		✓
Akuter und chronischer Schnupfen	✓	
Chronische Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen	✓	
Pollen- und Hausstauballergie		✓
Starke Staubbelastung		✓
Regelmäßige Schleimhautpflege		✓
Trockene Nase		✓

### Emser® Nasendusche mit Emser Salz®

- 100 % natürliche Wirkweise
- Bekämpft die Ursache und lindert die Symptome
- Befuchtet und reinigt die trockene Nasenschleimhaut



### Emser Salz® wirkt 3-fach stark:

- ✓ Emser Salz® verflüssigt zähes Sekret und aktiviert die Selbstreinigungsmechanismen der Nasenschleimhaut.
- ✓ Der spezielle Mineralstoffkomplex des Emser Salzes® puffert saure Stoffwechselprodukte und lindert dadurch Entzündungszeichen.
- ✓ Durch die im Emser Salz® enthaltenen Mineralstoffe und Spurenelemente wird die Wundheilung unterstützt.



# EMSER® – GESUNDHEITSPRODUKTE FÜR DIE GANZE FAMILIE



Exklusiv in Ihrer Apotheke!

## NATÜRLICH ERSTMAL EMSER®

**Emser Salz® Wirkstoff:** Natürliches Emser Salz. **Anwendungsgebiete:** Natürliches Heilvorkommen zur unterstützenden Behandlung durch Befuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme bei akuter und chronischer Bronchitis. **Emser® Nasenspray: Wirkstoff:** Natürliches Emser Salz. **Anwendungsgebiete:** Natürliches Heilvorkommen zur unterstützenden Behandlung durch Befuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme zur Beschleunigung des Heilungsprozesses nach endonasaler Nebenhöhlenoperation. **Emser® Nasendusche:** Medizinprodukt/Applikationshilfe zur Befuchtung und Reinigung der Nase. **Emser® Nasenspülsalz:** Medizinprodukt zur Befuchtung und Reinigung der Nase. Pulver zur Herstellung einer Nasenspülung nach Auflösen in Wasser. **Emser® Kindernasendusche Nasanita®:** Kombipackung mit 1 Applikationshilfe Emser® Kindernasendusche Nasanita® und 20 Beuteln Emser Salz 1,475 g. Medizinprodukt. Applikationshilfe zur Befuchtung und Reinigung der Nase bei Kindern zwischen 3 und 12 Jahren. **Emser® Inhalationslösung:** Medizinprodukt zur Befuchtung der Atemwege bei trockener Schleimhaut, zur Unterstützung der natürlichen Reinigungsmechanismen der Atemwege bei Erkrankungen, die mit vermehrter Schleimbildung und Schleimretention einhergehen. **Emser Pastillen® mit Ingwer zuckerfrei/Emssillen® Kakao:** Medizinprodukt zum Lutschen zur Befuchtung und Reinigung der Mund- und Rachenschleimhaut bei Halsschmerzen, Heiserkeit und Hustenreiz. **EMS Sinusitis Spray forte/Sinusitis Spray:** Medizinprodukte zum Einsprühen in die Nase zur Abschwellung und Reinigung der Nasenschleimhaut von Viren und Bakterien bei Rhinitis (Schnupfen), sowie bei akuter und chronischer Sinusitis (Entzündungen der Nasennebenhöhlen). **EMS Halsschmerz-Spray akut:** Medizinprodukt zum Einsprühen in den Rachen zur Behandlung von Halsinfektionen und Halsschmerzen. **EMS Husten-Spray:** Medizinprodukt zum Einsprühen in den Rachen zur Behandlung von trockenem Husten.

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie die Gebrauchsanweisung, der Arzt oder Apotheker.

Infos bei:  
SIEMENS & CO Pharma Ges.m.b.H.  
Schachadorf 75  
A-4552 Wartberg a.d. Krems  
+43 (0)7588 61995  
www.emser.at

Folge uns auf Instagram:  
@emser\_nasendusche, #freeyournose



532070\_A911



# EMSER® – DAS 1x1 DER NASENSPÜLUNG





## NASENSPÜLUNG – WOHLTUEND UND BEFREIEND

Regelmäßige Nasenspülungen sorgen für ein angenehmes und freies Gefühl im Nasenbereich.

### Nasenspülen

- Unterstützung der natürlichen Reinigungsfunktion der Nase
- Stärkung der Abwehrmechanismen
- Befeuchtung der Nasenschleimhaut
- Hilfe bei der Aufrechterhaltung der natürlichen Funktion

### Nasenspülen mit isotonen Salzlösungen

- Bedenkenlos über eine längere Zeit anwendbar
- Ideal für die Behandlung häufig wiederkehrender Atemwegsinfekte
- Schonend und nebenwirkungsarm
- Auch während der Schwangerschaft

## NASENSPÜLUNG MIT EMSER® – 100 % NATÜRLICHE WIRKWEISE

Emser® Nasendusche mit Emser® Salzen bekämpft die Ursache und lindert Symptome.

### Nasenspülung mit Emser Salz®

- Bei banalen akuten Infekten der oberen Atemwege, wie Schnupfen
- Bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung



### Nasenspülung mit Emser® Nasenspülsalz

- Zur täglichen Nasenpflege
- Zur Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten
- Bei Pollen- und Hausstauballergie
- Bei trockener Nase durch z. B. Klimaanlage oder Heizungsluft



### So einfach ist die Nase wieder sauber und befreit:

1. Nasenansatzstück waagrecht ausklappen & Nasendusche mit handwarmem Wasser befüllen.
2. Je nach Bedarf 1 Beutel Emser® Nasenspülsalz 2,5 g oder 1 Beutel Emser Salz® 2,95 g einfüllen & durch Schwenken auflösen. Nasenansatzstück bis zum Anschlag hochklappen.
3. Nasenansatzstück an ein Nasenloch ansetzen. Flüssigkeit fließt in das eine Nasenloch hinein & läuft durch das andere wieder heraus. Sie läuft nicht in den Rachen, wenn Sie Ihren Mund während der Spülung weit öffnen.



### Die komplette Nase spülen

Optimale Spüldruckregulierung durch integriertes **Deckelventil**

### Leicht komprimierbar

Hochelastischer, ergonomisch geformter **Spülbehälter**

### Hygienisch, sicher, standfest

Zerlegbar, spülmaschinenfest und auskochbar, mit stabilem **Basisteil** mit Bajonettverschluss

### Exakt abgestimmt

Praktische **Portionsbeutel** passend zur Füllmenge der Nasendusche



### Tipp:

Drückt man den Spülbehälter leicht zusammen, kann die Spüllösung nicht nur den unteren, sondern auch den mittleren und oberen Nasengang erreichen. Dort schließen die Nasennebenhöhlen und das Geruchsorgan an.



Weitere Informationen sowie einen Film zur richtigen Anwendung finden Sie hier: [www.emser.at](http://www.emser.at)

